

## Parametri consigliati per Cara process NEM (tutte le indicazioni sono in mm)

		Superficie interna della corona			Superficie esterna della corona/moncone						
Lavori		Lacca chiusura supplementare	Lacca chiusura	Distanza dalla linea di margine	Spessore parete cappellet.	Altezza parete cappelletta	Offset dalla linea di margine	Angolo Offset	Offset di estensione	Modifica connet.mm2	
Corone singole	Frontale	0,065 - 0,095	0,017 - 0,025	0,5 - 2,0	0,35	1,0 - 2,5	0,10	65 - 100°	0,1		
	Premolare	0,065 - 0,090	0,017 - 0,020	0,5 - 2,0	0,35	1,0 - 2,5	0,10	65 - 100°	0,1		
	Molar e	0,065 - 0,090	0,017 - 0,020	0,5 - 2,0	0,35	1,0 - 2,5	0,10	65 - 100°	0,1		
	Primaria	0,065 - 0,090	0,017 - 0,020	0,5 - 2,0	0,4	1,0 - 2,5	0,10	40 - 85°	0,1		
Due elementi con connessione					Parametri come sopra, porre attenzione a spessore connettori						5-7
Ponti (3 el.)	Frontale (1-3)	0,065 - 0,095	0,017 - 0,025	0,5 - 2,0	0,35	1,0 - 2,5	0,10	70 - 90°	0,1	min. 5	
	Laterali (3-5)	0,065 - 0,095	0,017 - 0,025	0,5 - 2,0	0,35	1,0 - 2,5	0,10	70 - 90°	0,1	min. 6	
	Prossimali (5-8)	0,065 - 0,095	0,017 - 0,020	0,5 - 2,0	0,35	1,0 - 2,5	0,10	70 - 90°	0,1	min. 6	
Ponti (4 el.)	Frontali	0,065 - 0,095	0,017 - 0,025	0,5 - 2,0	0,35	1,0 - 2,5	0,10	70 - 90°	0,1	min. 5	
	Laterali	0,065 - 0,095	0,017 - 0,025	0,5 - 2,0	0,35	1,0 - 2,5	0,10	70 - 90°	0,1	min. 6	
Ponti (5 el.)	Frontali	0,065 - 0,095	0,017 - 0,025	0,5 - 2,0	0,4	1,0 - 2,5	0,10	70 - 90°	0,1	min. 6	
	Laterali	0,065 - 0,095	0,017 - 0,025	0,5 - 2,0	0,4	1,0 - 2,5	0,10	70 - 90°	0,1	min. 7	
Ponti (6 el.)	Frontali	0,075 - 0,095	0,017 - 0,025	0,5 - 2,0	0,4	1,0 - 2,5	0,10	70 - 90°	0,1	min. 6	
	Laterali	0,065 - 0,095	0,017 - 0,025	0,5 - 2,0	0,4	1,0 - 2,5	0,10	70 - 90°	0,1	min. 7	
Ponti (6-7 el.)		0,075 - 0,100	0,017 - 0,025	0,5 - 2,0	min. 0,4	1,0 - 2,5	0,10	65 - 90°	0,1	min. 7	

Stand: 05.03.2010